

Para mais informações, visite [www.antifungicos.bayer.pt](http://www.antifungicos.bayer.pt)

Data de revisão: 11/2014

Distribuição em Portugal:

Bayer Portugal, Lda.

Rua Quinta do Pinheiro, 5

2794-003 Carnaxide



Fabricante:

Rolf Kullgren AB, Agatan 4, 646 30 Gnesta  
Suécia

© 2014 Bayer plc.

Todos os direitos reservados

Identificação dos símbolos na embalagem exterior



Consultar instruções de utilização



Não reutilizar



Conservar entre 2°C e 30°C



Código de lote



Utilizar até



Número de catálogo



0344

34147-02

Bayer

**Gyno-Canesbalance**<sup>®</sup>

Vaginose Bacteriana  
Gel Vaginal



**Gyno-Canesbalance**<sup>®</sup> está clinicamente comprovado no tratamento eficaz e simples dos sintomas da Vaginose Bacteriana ao restabelecer o pH normal e a flora vaginal.

#### O que é a Vaginose Bacteriana

A Vaginose Bacteriana é uma condição vaginal muito frequente. Geralmente, diferentes tipos de bactérias estão presentes naturalmente na vagina; as bactérias que estão presentes em maior número são os Lactobacillus. Estas bactérias produzem ácido láctico, que mantém o nível normal do pH vaginal (pH baixo), conferindo proteção contra as infeções.

Quando o número de Lactobacillus diminui, o valor de pH sobe, provocando uma alteração na flora vaginal e o crescimento de bactérias "más". Esta condição é conhecida, em termos médicos, como Vaginose Bacteriana. Os principais sintomas associados à Vaginose Bacteriana são odor desagradável a peixe, corrimento anormal e desconforto vaginal.

#### O que causa a Vaginose Bacteriana

Os fatores que alteram a flora vaginal e que podem provocar a Vaginose Bacteriana incluem menstruação prolongada, utilização de produtos de higiene íntima, lavagem vaginal frequente, contraceptivos, medicamentos vaginais, relações sexuais e stress. A toma de alguns antibióticos e a utilização de Dispositivo Intrauterino (DIU) podem também alterar o equilíbrio da flora vaginal.

**Gyno-Canesbalance® trata os sintomas da Vaginose Bacteriana de uma forma natural.** Gyno-Canesbalance® contém ácido láctico que neutraliza eficazmente o mau odor e restabelece o pH normal da vagina. Também contém glicogénio que fornece os nutrientes às bactérias lácticas, auxiliando o seu crescimento. Com o pH normal e nutrientes, as bactérias lácticas protetoras crescem e o equilíbrio vaginal natural é restabelecido; existe um alívio eficaz do corrimento anormal e do desconforto. O tratamento é realizado com aplicadores em bisnaga de utilização única e fácil.

#### **Quando utilizar Gyno-Canesbalance®**

Utilize Gyno-Canesbalance® no tratamento dos sintomas da Vaginose Bacteriana. Combate o odor desagradável, o corrimento anormal e o desconforto, e restabelece os valores normais de pH.

#### **Como utilizar Gyno-Canesbalance®**

<b>Tratamento</b>	Para um alívio eficaz dos sintomas da Vaginose Bacteriana, tais como: mau odor, corrimento anormal e desconforto vaginal	Utilize 1 bisnaga por dia durante 7 dias
-------------------	--	--

Gyno-Canesbalance® está disponível em aplicadores em bisnaga de utilização única. Rode e retire a ponta do aplicador, sente-se ou deite-se numa posição confortável e insira suavemente a cânula do aplicador na vagina, o mais profundamente possível. Aperte suavemente o aplicador para libertar o seu conteúdo. Mantendo a bisnaga apertada com os dedos retire-a e descarte-a. Gyno-Canesbalance® deve ser aplicado ao deitar. Pode ser útil utilizar um penso higiénico, pois é frequente ocorrer uma perda ligeira. Isto não significa que o tratamento não funcionou.

#### **Gyno-Canesbalance® está testado clinicamente.**

Estudos clínicos demonstraram que a fórmula de Gyno-Canesbalance® Gel Vaginal é bem tolerada e eficaz. Proporciona um benefício triplo, pois elimina eficazmente o mau odor e o corrimento anormal ao restabelecer o equilíbrio do pH, limita o crescimento de bactérias “más” e auxilia as bactérias “boas” (Lactobacillus) a restabelecerem a flora vaginal.

#### **Utilizar Gyno-Canesbalance® durante a gravidez e possíveis efeitos secundários**

Gyno-Canesbalance® pode ser utilizado durante a gravidez e durante a menstruação. Contudo, se está grávida e pensa que pode ter uma infeção vaginal, deve consultar o seu médico. Gyno-Canesbalance® pode provocar algum ardor temporário que diminui gradualmente. Se durante o tratamento tiver alguma dúvida procure aconselhamento médico.

#### **Quando se deve dirigir ao seu médico**

Fale com o seu médico em caso de agravamento dos sintomas, se sentir dor, se o desconforto não desaparecer, se o corrimento apresentar vestígios de sangue ou se o corrimento ocorrer durante a menopausa. Se está grávida e pensa que pode ter uma infeção vaginal, deve consultar o seu médico. Se não sentir alívio dos sintomas depois de utilizar Gyno-Canesbalance® conforme indicado, deve contactar o seu médico. Fale com o seu médico sobre o diagnóstico da Vaginose Bacteriana.

#### **Qual o conteúdo de Gyno-Canesbalance®**

A embalagem contém 7 aplicadores em bisnaga de 5 ml de utilização única, para um tratamento completo.

#### **Cada aplicador contém os seguintes ingredientes:**

Ácido láctico, Glicogénio, Propilenoglicol, Hidroxipropilmetilcelulose, Lactato de sódio, Água, pH 3,8.  
Sem conservantes nem hormonas.

#### **Advertências**

Não utilizar se a ponta do aplicador estiver partida. Não utilizar o gel após o prazo de validade. Manter fora do alcance das crianças.

#### **Precaução**

Se está a tentar engravidar, aconselhe-se com o seu médico antes de utilizar Gyno-Canesbalance®, pois o gel tem um pH baixo que pode tornar o ambiente menos favorável para o esperma. Não utilizar como método contraceutivo.